


IBox Touch

Guía rápida

La IBox Touch conecta el equipo de imagen con los sistemas HIS y PACS. Durante el examen, controle la captura de imágenes y videos mediante la pantalla táctil, el pedal o el endoscopio.



Lista de exámenes

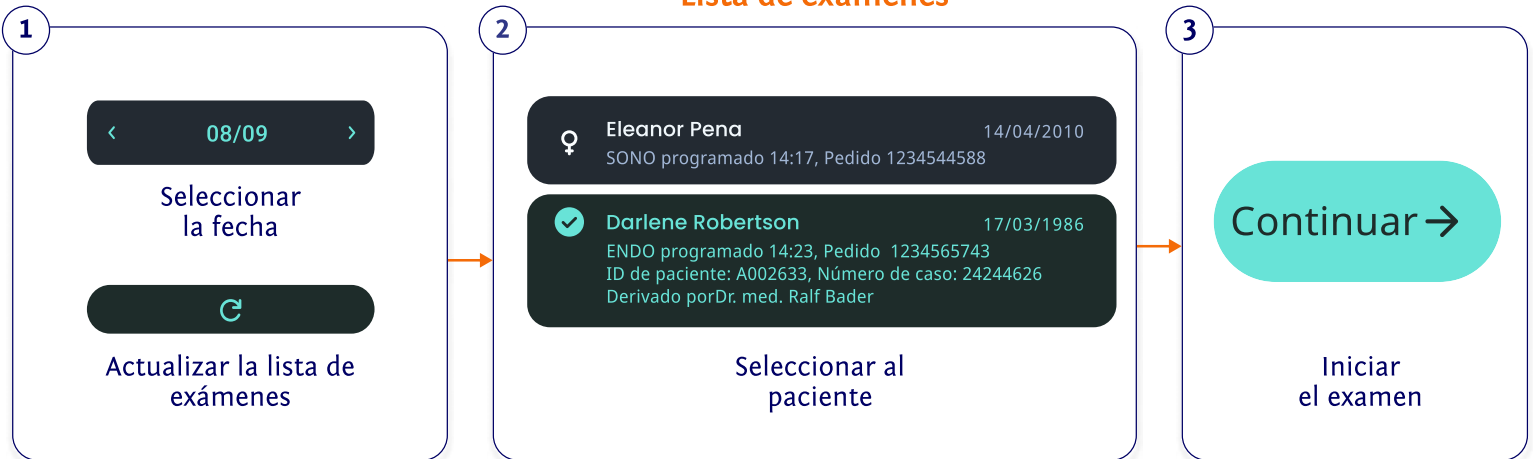


Examen



Instrucciones detalladas disponibles

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- Esta guía rápida contiene la información más relevante para el uso diario de la IBox Touch.
- Puede encontrar información detallada en el manual de instalación y uso disponible electrónicamente en la ventana de estado de la IBox Touch o escaneando el código QR.
- Se le puede enviar una versión impresa bajo solicitud en un plazo de 7 días.



⚠ Aviso importante

Apague la IBox Touch a través del botón de encendido en la pantalla táctil.



Espere hasta que el diodo de encendido se apague.




IBox Touch Compact

Luego apague el sistema principal para asegurarse de que todos los procesos hayan finalizado.




IBox Touch Pro

Lista de exámenes

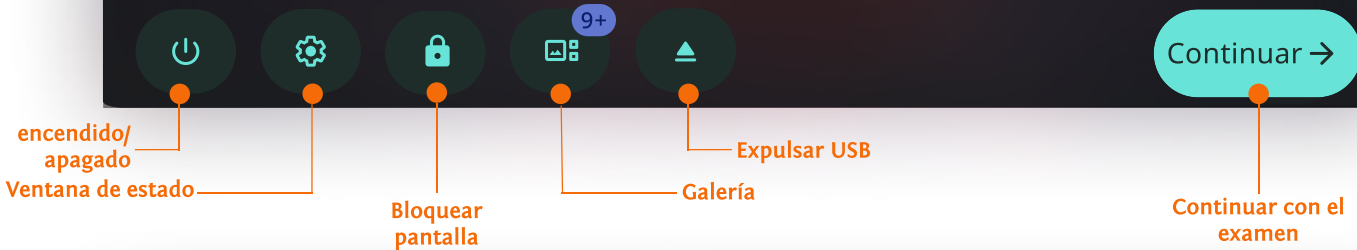

Examen

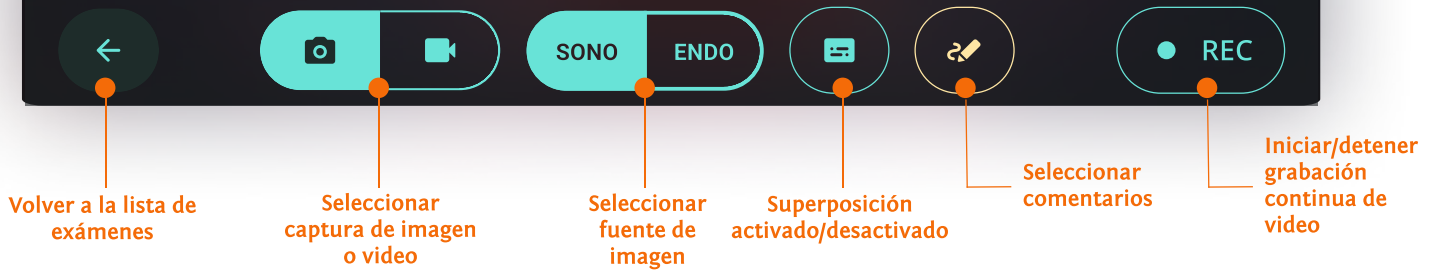

Instrucciones de limpieza

! La superficie de la pantalla táctil es de vidrio, y la carcasa de aluminio.

No utilice productos químicos agresivos para la limpieza y desinfección. Realice los procedimientos indicados solo cuando sea absolutamente necesario, ya que las interacciones químicas inevitables siempre afectarán al material.

! La IBox Touch está protegida contra la penetración de líquidos, excepto en la parte inferior donde están las conexiones. **Una limpieza inadecuada o la penetración de líquidos en el interior del dispositivo puede causar daños y comprometer la seguridad del paciente y del examinador.**


MESO es su especialista en documentación médica.

Descubra nuestra innovadora cartera de productos:



SonoWin® Solución completa para archivo e informes

Optimizados con médicos desde 1993: rápida, ágil y confiable. Para todas las especialidades. Integra HL7, DICOM, GDT y más.

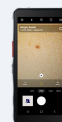

DICOM Camera

Como cámara de sistema o siempre a mano. Un enorme alivio para enfermeras, dermatólogos y otros: ahorra más del 80% del tiempo en la documentación de piel y heridas.

¿Preguntas? Escríbenos:
service@meso.biz



meso international GmbH
Markt 21-23, 09648 Mittweida
Alemania

Teléfono: +49 3727 9697 – 0
E-Mail: info@meso.biz
www.IBoxTouch.com